



NEU!

ThermaSafe Pet FORTE.
Die nächste Generation
für mehr Wärme,
Komfort und Sicherheit.

**Die autarke
Wärmedecke!**

ThermaSafe Pet FORTE ist UnCool

**Ihr Peri- und Postoperatives
Temperaturmanagement neu gedacht!**



ThermaSafe Pet FORTE selbstheizende Wärmedecke **Größe XS**
270 x 470 mm
mit 2 Wärmepads

VE: 15 | 20 x 18 x 25,5 cm | ca. 3,2 kg



ThermaSafe Pet FORTE selbstheizende Wärmedecke **Größe S**
400 x 400 mm
mit 3 Wärmepads

VE: 15 x | 20 x 18 x 25,5 cm | ca. 3,2 kg



ThermaSafe Pet FORTE selbstheizende Wärmedecke **Größe M**
600 x 600 mm
mit 4 Wärmepads

VE: 10 | 20 x 18 x 25,5 cm | ca. 3,0 kg

ThermaSafe_{pet}[®]

Exklusiv bei:



www.VetShop.de



**Veterinary
Expert
Technologies AG**

Talstrasse 50
CH-4112 Flüh
www.vet-ag.com

ThermaSafe_{pet}[®]



ThermaSafe Pet FORTE.
Die nächste
Generation für mehr Wärme,
Komfort und Sicherheit.



Mit der neuen, zweiten Generation unserer Wärmedecke **ThermaSafe Pet FORTE** setzen wir neue Maßstäbe in Sachen Wärmemanagement für Ihre Patienten. Aufbauend auf dem bewährten ThermaSafe-Prinzip haben wir das Produkt konsequent weiterentwickelt und machen Ihr peri- und postoperatives Temperaturmanagement jetzt so spielend einfach und so sicher wie nie zuvor:

Verbesserte Wärmeleistung

Durch eine optimierte Zusammensetzung der Wärmeelemente erzeugt **ThermaSafe Pet FORTE** eine gleichmäßige, wohltuende Wärme, die lang anhält. So bleibt Ihr Patient auch bei niedrigen Temperaturen zuverlässig gewärmt.

Schnelleres Aufheizen

Neue Aktivkohle- und Eisenpulver-Komponenten der Wärmepads sorgen für ein deutlich schnelleres Erreichen der optimalen Temperatur.



Maximale Sicherheit

ThermaSafe Pet FORTE Wärmedecken enthalten zwischen mehreren Lagen Spezialviskose integrierte Wärmepads. Nach Entnahme aus der versiegelten Verpackung erwärmen sich die Pads durch Luftexposition innerhalb von ca. 10 – 20 Minuten auf bis zu 40° C und wärmen so Ihre Patienten völlig zuverlässig bis zu 8 Stunden.

Besonders anwenderfreundlich

Einfach aktivieren, den Patienten abdecken, fertig – keine Kabel, keine Stromquelle, keine komplizierte Handhabung.

Hypothermie ist die häufigste, oftmals übersehene und meist unterschätzte Komplikation bei Narkosen und Leichtnarkosen. Je nach Ausprägung kann eine Hypothermie schwerwiegende, gesundheitliche Folgen für Ihre Patienten haben und im äußersten Fall zum Tod führen.


Hypothermie – lieber einfache Prophylaxe, als aufwändige Therapie!



XS: 27 x 47 cm

S: 40 x 40 cm


M: 60 x 60 cm

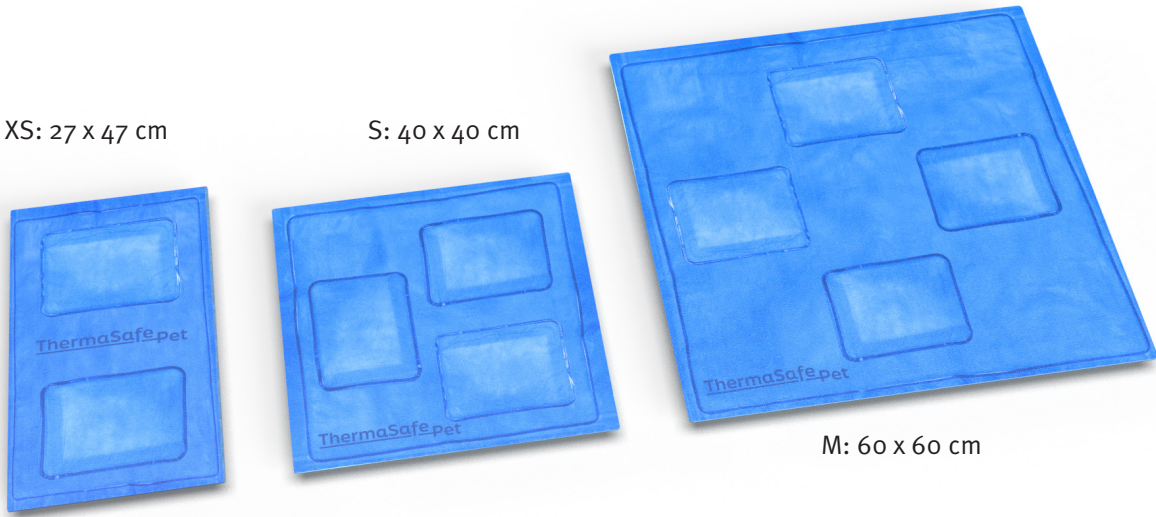


Ihre Qualitätsvorteile mit **ThermaSafe Pet FORTE:**

- Drei Größen: XS, S, M
- **ThermaSafe Pet FORTE** wärmt Ihre Patienten immer verlässlich – vor, während und nach der Narkose
- Erfolgreich klinisch erprobt
- Keine Störsignale während der Narkose mit elektronischen Geräten, wie zum Beispiel EKG, etc.
- Keine Stolperfallen durch Stromkabel oder ähnliches im Operationsumfeld
- Keine Lärmbelästigung im OP oder auf Station
- Mitgabe der **ThermaSafe Pet FORTE** Wärmedecke an die Patientenbesitzer – Wärmekomfort vom Tierarzt bis daheim
- Konstante und zuverlässige Aufrechterhaltung der Temperatur **bis zu 8 Stunden**
- Hergestellt aus unbedenklichen Materialien


Vorbereitung:

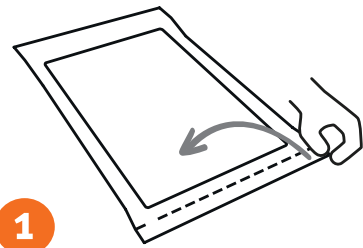

1 Öffnen Sie die Verpackung unten an der Aufreißlasche und entnehmen Sie die **ThermaSafe Pet FORTE** Wärmedecke.

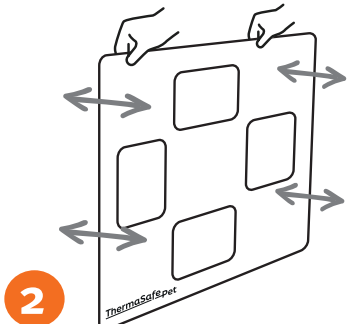


2 Schütteln Sie die **ThermaSafe Pet FORTE** Wärmedecke kurz aus, um die Wärmereaktion zu aktivieren.

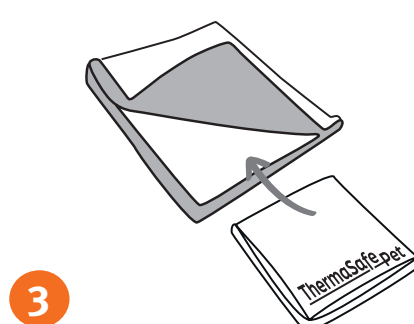


3 Für eine zügige Erwärmung falten Sie die **ThermaSafe Pet FORTE** Wärmedecke wieder zusammen und belassen diese für ca. 10-20 Minuten in der **Microfaser-Aktivierungstasche**. Danach ist die Decke einsatzbereit.


Anwendung:

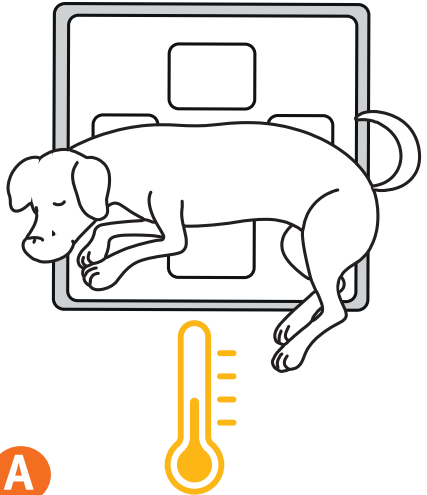

A Für mäßige Wärmezufuhr legen Sie Ihren Patienten auf die **ThermaSafe Pet FORTE** Wärmedecke. Achten Sie auf eine entsprechende Unterlage, damit die Wärme nicht ungewollt in den Tisch abgeführt wird.

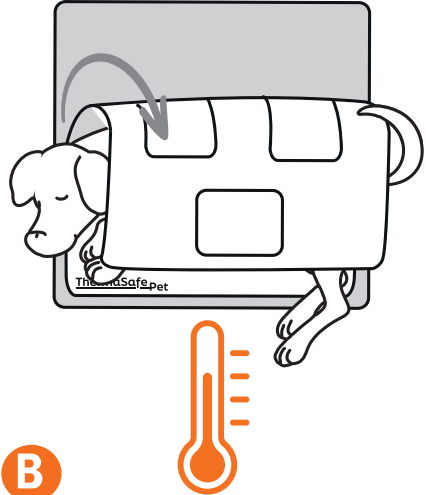

B Für mittlere Wärmezufuhr decken Sie Ihren Patienten mit der **ThermaSafe Pet FORTE** Wärmedecke ab.

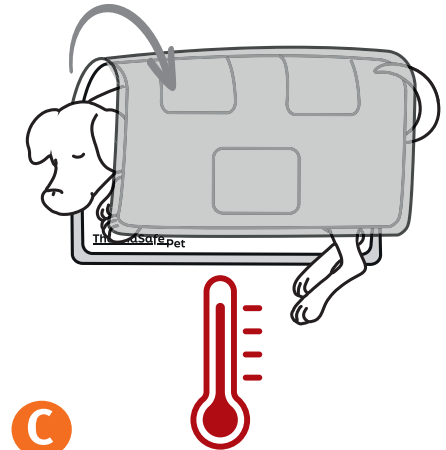

C Für hohe Wärmezufuhr verwenden Sie zusätzlich ein oder mehrere Lagen Viskose oder eine Decke über der **ThermaSafe Pet FORTE** Wärmedecke.