

# Bedienungs- und Pflegeanleitung für indulab Boxen und Boxengestelle



*gültig ab Baureihe April 2026*

Herzlichen Glückwunsch zu Ihren neuen indulab Boxen.

Wir haben sie mit viel Liebe entwickelt  
und sorgfältig vormontiert, damit Sie viel Freude damit haben.

1.	Allgemeine Sicherheitshinweise . . . . .	3
2.	Haftungsausschluss . . . . .	3
3.	Material . . . . .	4
4.	Pflege und Desinfektion . . . . .	5
5.	Aufbaumöglichkeiten für Tierboxengestelle . . . . .	6
6.	Tierboxengestelle . . . . .	8
7.	Wechsel der Türblätter . . . . .	10
8.	Türblatt nivellieren . . . . .	10
9.	Türanschlag tauschen . . . . .	11
10.	Türen schließen und sichern . . . . .	11
11.	catfriendly Status . . . . .	12
12.	Heizmatte anbringen . . . . .	14
13.	Zubehör ... eine Auswahl . . . . .	15
14.	Kontakt . . . . .	16

## **1. Allgemeine Hinweise gültig für alle indulab Tierboxen aus GFK**

Vielen Dank, dass Sie sich für eine indulab Tierbox entschieden haben. Diese Anleitung enthält wichtige Hinweise zur sicheren Verwendung, Reinigung, Desinfektion und Pflege Ihrer Tierbox oder Tierboxenkombination. Lesen Sie die Anleitung vor der ersten Verwendung vollständig durch und bewahren Sie sie für spätere Fragen auf.

## **2. Haftungsausschluss**

Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung, Reinigung, Montage, Demontage, bauliche Veränderungen oder Nichtbeachtung dieser Anleitung entstehen, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen. Gesetzliche Rechte bleiben unberührt.

Bei Tieren mit starkem Bewegungs-, Beiß-, Kratz- oder Ausbruchverhalten kann nicht ausgeschlossen werden, dass Türen, Gitter, Verschlüsse oder Temperaturanzeigen beschädigt werden oder dass das Tier versucht, die Tür zu öffnen. Der Betreiber ist dafür verantwortlich, die Tür bei Bedarf zusätzlich mit einem Splint oder Vorhängeschloss zu sichern. Hierfür befindet sich eine Bohrung in der Türverschluss-Schiene.

Solche Schäden gelten nicht als normale Abnutzung und sind nicht von der Gewährleistung umfasst.



### 3. Material

Der Tierboxenkörper ist aus GFK (Glasfaserverstärkter Kunststoff) gefertigt.

GFK ist ein Qualitätswerkstoff, der in vielen Bereichen verwendet wird, wo es auf Qualität und Langlebigkeit des Produktes ankommt. Die Tierboxen werden in Handarbeit gefertigt und bieten eine robuste, chemikalienresistente Oberfläche.

Die Innenseiten der Tierboxen sind ohne Ecken und Kanten. Bei entsprechender Pflege kann jederzeit eine einwandfreie und optimale Hygiene gewährleistet werden.

Gittertüren, Verschlüsse und Scharniere sind aus elektropoliertem Edelstahl gefertigt.

Die transparenten Türen sind aus Polycarbonat gefertigt.

Unsere Gestellteile für die Tierboxen sowie Schrauben und Muttern sind aus elektrolytisch verzinktem Stahl hergestellt.

### 4. Pflege und Desinfektion

#### **Reinigung**

Reinigen Sie die Innen- und Außenseiten der Tierbox regelmäßig mit einem weichen, feuchten Baumwolltuch. Als Reinigungsmittel eignet sich ein mildes, handelsübliches Handwaschmittel.

Bei starker Verschmutzung kann der GFK-Tierboxenkörper mit einem Hochdruckreiniger gereinigt werden. Richten Sie den Wasserstrahl nicht direkt auf Scharniere, Verschlüsse, Rollen, Temperaturanzeigen oder empfindliche Bauteile.

Polycarbonat-Türen mit integrierter Temperaturanzeige dürfen ausschließlich mit einem leicht feuchten, weichen Tuch gereinigt werden.

Nicht verwenden: Scheuernde Schwämme, harte Bürsten, Stahlwolle, Scheuermittel, aggressive Lösungsmittel oder stark alkalische bzw. stark saure Reinigungsmittel. Diese können Kratzer oder Verfärbungen verursachen.

#### **Desinfektion**

Zur Oberflächendesinfektion von GFK-Tierboxen, Edelstahl, Stahlgestellen, Polycarbonat-Türen und von Kunststoffteilen dürfen keine chlor-, chlorid- und jodhaltigen Desinfektionsmittel eingesetzt werden. Es dürfen nur Desinfektionsmittel verwendet werden, die vom Hersteller für die jeweiligen Materialien freigegeben sind. Die Angaben des Desinfektionsmittelherstellers zu Konzentration, Einwirkzeit und Anwendung sind zu beachten.




Nach dem Ende der Einwirkzeit kann die desinfizierte Fläche z.B. mit Einwegtüchern (keine kratzenden oder harten Materialien) trockengewischt werden. Bedecken Sie den Tierboxenboden erst wieder mit einer Matte oder anderen Liegematerialien, wenn dieser vollständig abgetrocknet ist.

Vermeiden Sie längeres Aufliegen von feuchten oder verschmutzten Auflagematten oder zu langes Verweilen von Flüssigkeiten (Urin, Blut, Infusionslösungen etc.) auf der Tierboxenoberfläche, da dies zu Verfärbungen führen kann.

**ACHTUNG:** Stark färbende Desinfektionsmittel können zu Verfärbungen der Boxen-Innenseiten führen.


## 5. Aufbaumöglichkeiten für Tierboxengestelle

Die Abbildung zeigt verschiedene mögliche Anordnungen der Tierboxen im Gestell, dargestellt in der Seitenansicht. Die angegebenen Maße zeigen die Bohrungspositionen für die Querstreben, gemessen ab dem unteren Gestellende. Rollen (13,5cm) oder Nivellierfüße (ca. 2cm) sind bei Bedarf hinzuzurechnen. Alle Angaben in mm.

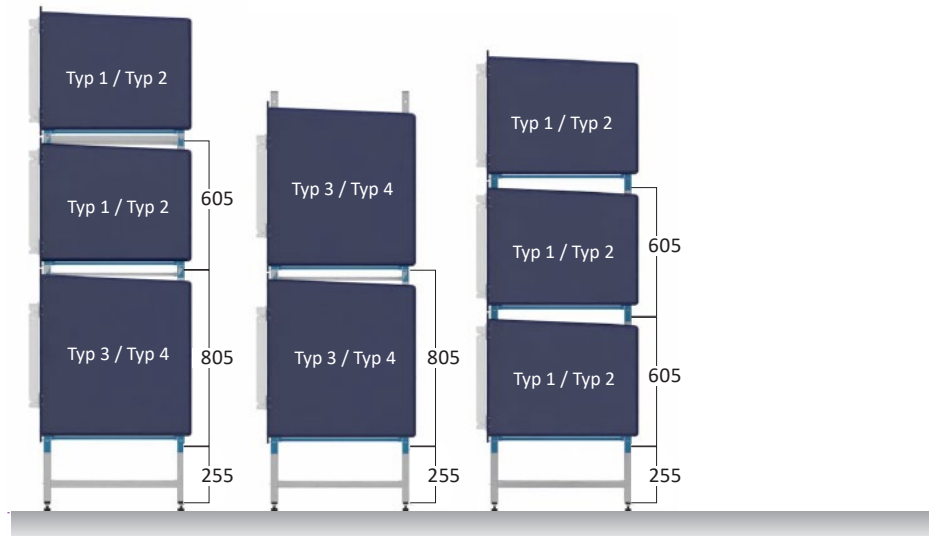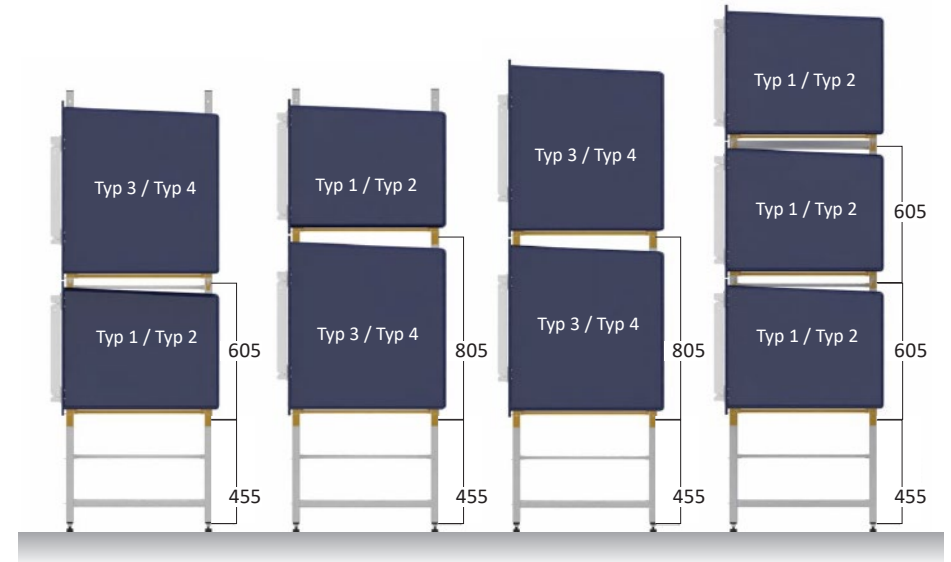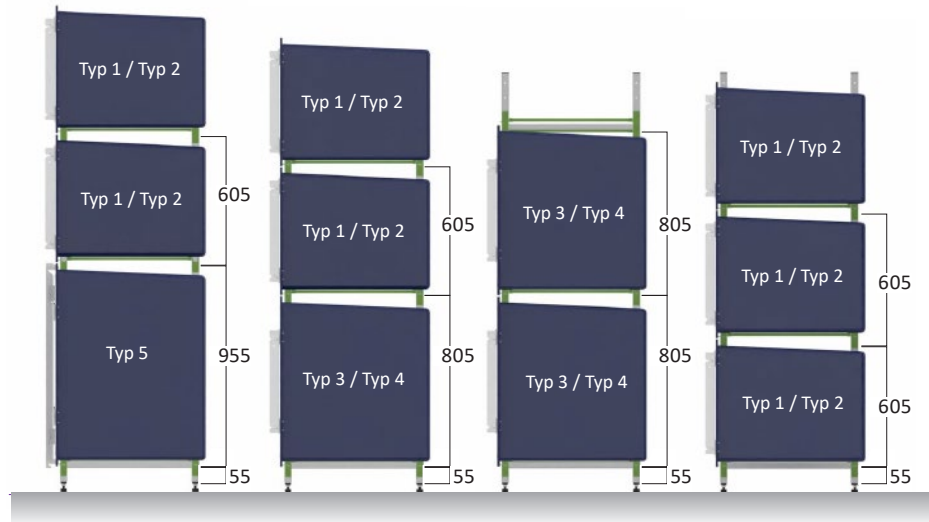

## 6. Tierboxengestelle

### Einzelteile und Montage

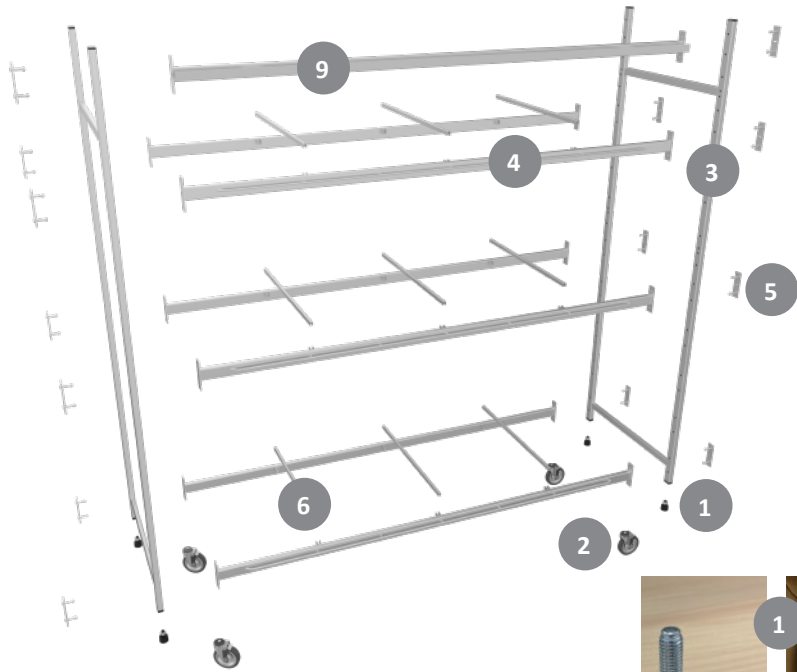


#### Nivellierfüße oder optional Rollen montieren

- Die Gestelle werden standardmäßig mit Nivellierfüßen (1) ausgeliefert. Die Höhe kann durch Ein- und Ausschrauben verstellt werden. Durch das enthaltene Kugelgelenk wird die Tierboxenkombination waagrecht ausgerichtet.
- Tierboxengestelle bis 185 cm Breite können optional mit Lenkrollen (2) ausgerüstet werden.
- An der Vorderseite des Tierboxengestells werden die Rollen mit Feststellbremse montiert. Die hinteren sind ungebremst.



#### Seitenteile aufstellen und Querstreben einsetzen

- Seitenteile (3) aufstellen und Querstreben (4) mit mitgeliefertem Befestigungsmaterial (5)

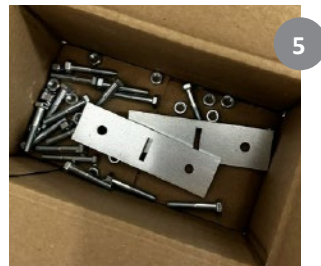

montieren. Die Montagehöhe der Querstreben entnehmen Sie bitte den Grafiken aus Seite 6-7. Es gilt zwischen vorderen und hinteren Streben zu unterscheiden: die vorderen Streben weisen einen nach vorne stehenden Distanzbügel auf.

#### U-Profile einlegen

- Die U-Profile (6), werden in die dafür vorgesehenen Halterungen zwischen vorderen und hinteren Querstreben eingesetzt. Sie dienen der Stütze und als zusätzliche Auflage für breitere Tierboxen.

#### Versorgungsschiene einsetzen



- Hat das Boxengestell eine Versorgungsschiene (9), so setzen Sie diese mit den mitgelieferten Schrauben horizontal ein.

#### Boxen einsetzen

- Die Tierboxen werden einfach auf die Querstreben des Gestells aufgesetzt (nicht verschraubt) und können so bei Bedarf jederzeit ohne Werkzeug aus dem Gestell entnommen werden.
- Ein Aluminiumwinkel (7) am Tierboxenboden, welcher genau hinter der hinteren Querstrebe zu liegen kommt, hält die Tierbox auf dem Gestell und verhindert ein Verrutschen nach vorne.
- Große Tierboxen (Typ 4 und Typ 5) können zusätzlich mit einem Splint (8) an der hinteren Querstrebe gesichert werden.

#### Generelle Empfehlung:


Montieren und demontieren Sie die Tierboxen bzw. deren Gestelle nur, wenn Sie über die nötigen handwerklichen Fachkenntnisse und Erfahrungen verfügen. Unsachgemäße Montage, Demontage oder eigenmächtige Veränderungen können zu Schäden oder Funktionsbeeinträchtigungen führen.

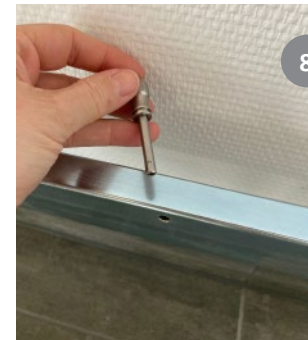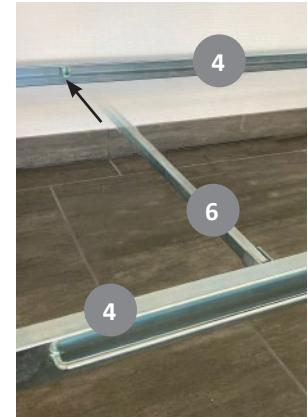


## 7. Wechsel der Türblätter



den Scharniersplint lösen

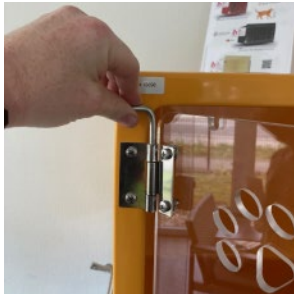


nach oben rausziehen

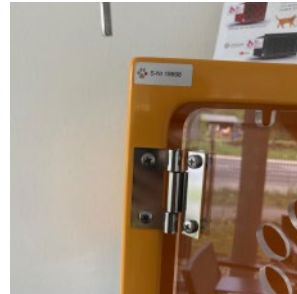


Türblatt beim Lösen der Scharniere sicher halten



Türblatt entnehmen

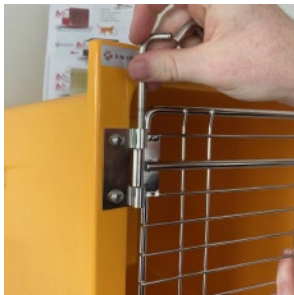

neue Tür durch Zusammenführen von Scharnier und Scharniersplint einsetzen

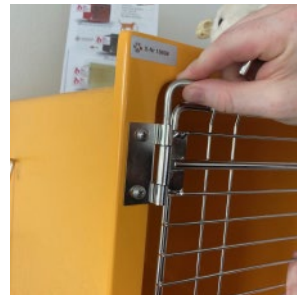

Scharniersplint zur Seite drehend sichern

## 8. Türblatt nivellieren



Die Ausrichtung der Tür kann durch Lösen der Kreuzschrauben eingestellt werden. Dazu die Schrauben leicht anlösen und die Tür ins Lot bringen. Dann die Schrauben wieder fest anziehen.


## 9. Türanschlag tauschen



Sollte der Türanschlag geändert werden, lösen Sie die Kreuzschrauben vollständig. Montieren Sie das Scharnier auf der anderen Seite der Tierboxöffnung. Drehen Sie das Türblatt und sichern Sie dieses durch Einsetzen des Scharniersplints.


**ACHTUNG:** Ein nachträglicher Wechsel des Anschlags ist bei Polycarbonattüren mit Thermometer wenig sinnvoll, da die Anzeige dann kopfsteht.

## 10. Türen schließen und sichern

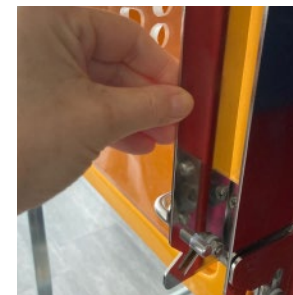

Die Türen der indulab Tierboxen werden über den seitlichen Türverschluss sicher geschlossen. Achten Sie beim Schließen darauf, dass das Türblatt vollständig anliegt und der Verschluss korrekt in der vorgesehenen Position einrastet.

Bei Tieren mit starkem Bewegungs-, Beiß-, Kratz- oder Ausbruchsverhalten empfehlen wir, die Tür zusätzlich zu sichern. Hierfür kann die vorhandene Bohrung in der Türverschluss-Schiene genutzt werden. Sie befindet sich unterhalb des oberen Verschlussdorns.

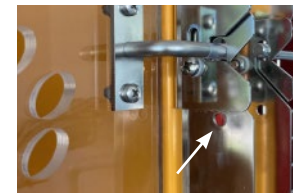

Zur zusätzlichen Sicherung kann je nach Bedarf ein Splint oder ein kleines Vorhängeschloss eingesetzt werden. Prüfen Sie vor jeder Nutzung, ob die Tür ordnungsgemäß geschlossen und die zusätzliche Sicherung korrekt angebracht ist.

**ACHTUNG:** Der Betreiber ist dafür verantwortlich, die Tierbox entsprechend dem Verhalten und der Kraft des jeweiligen Tieres ausreichend zu sichern. Beschädigungen durch starkes Beißen, Kratzen, Stoßen oder Ausbruchsversuche gelten nicht als normale Abnutzung.

## 11. catfriendly Status

Unsere verschiedenen Boxengrößen unterstützen Sie bei Ihrem catfriendly-Status.



Typ1  
Abmessungen : 600 x 700 x 600 mm ( B x T x H )




Versteckbox

Typ2  
Abmessungen :  
900 x 700 x 600 mm  
( B x T x H )




Typ3  
Abmessungen : 900 x 700 x 800 mm ( B x T x H )

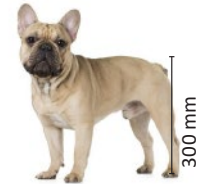

Typ4  
Abmessungen : 1200 x 700 x 800 mm ( B x T x H )



Typ5  
Abmessungen :  
1500 x 700 x 950 mm  
( B x T x H )

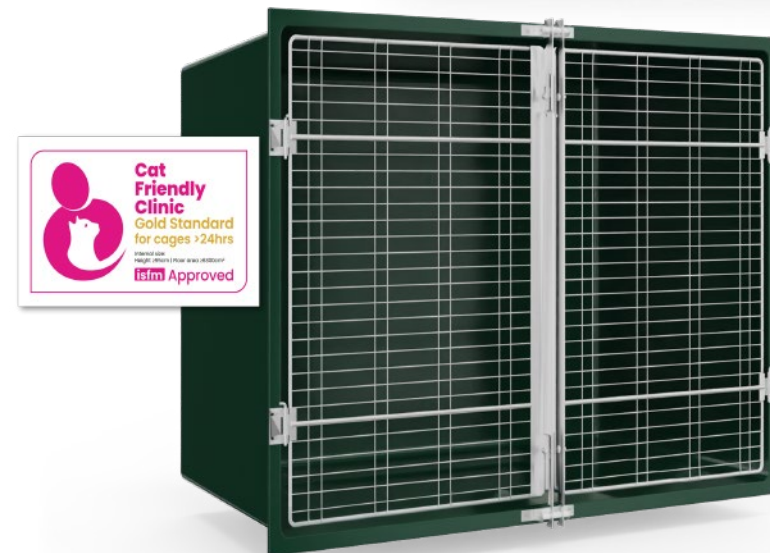

Typ6  
Abmessungen :  
1500 x 700 x 1090 mm  
( B x T x H )


## 12. Heizmatte anbringen

Für die Anbringung der Heizmatte empfehlen wir die Positionierung im hinteren Eckbereich auf der unteren Außenseite der Tierbox. Vor Anbringung muss dieser Bereich komplett gesäubert, fettfrei und trocken sein.

Die Matte kann dann durch einen hitze-resistenten Kleber (zusätzlich zur vorhandenen Klebeschicht) auf die vorbereitete Fläche geklebt werden.





Achten Sie bei der Anbringung darauf, dass die mitgeführten Kabel nicht geknickt oder beschädigt werden.

Die Lebensdauer der Heizmatte hängt wesentlich von einer sorgfältigen Montage und einer knickfreien Kabelführung ab.

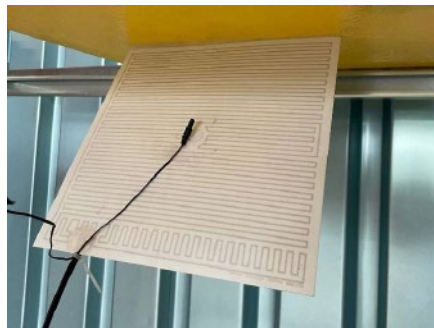

## 13. Zubehör ... eine Auswahl

- 1 Indulab Katzen-Versteckbox seitlich mit rundem Ausschnitt und Einblicksöffnung, passend für alle Indulab Tierboxen auf der rechten Seite V500627
- 2 Heizelement für Tierboxen aus Polyester, mit einstellbarem Thermostat V500187
- 3 Infusionshalter für Tierboxen mit Polycarbonattüren V500328
- 4 Indulab A4 Halterung für Medikamente und Datenblätter, mit Verschraubung an Gittertür V500213
- 5 Schnellfixierblock mit Curry-Klemme Euronorm 25/10 mit Feststellhebel V602955
- 6 Wärmeleuchte mit Halterung, verstellbar V500282

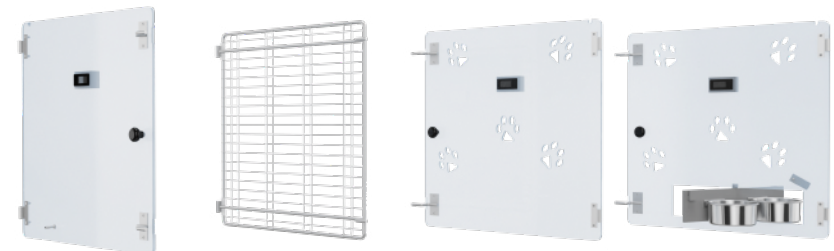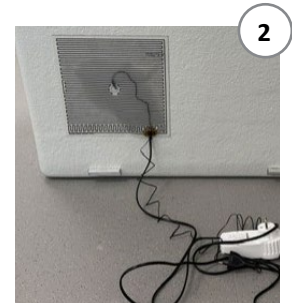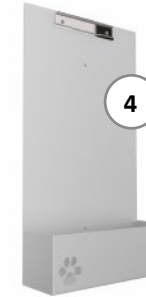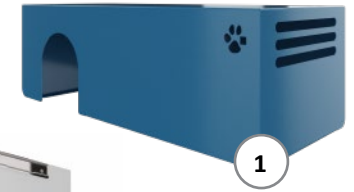

## **14. Kontakt**

Bei Fragen, Anregungen oder Kritik sind wir jederzeit gern für Sie erreichbar.

Kontaktieren Sie uns jederzeit unter [www.indulab.ch](http://www.indulab.ch)  
oder via E-Mail an [info@indulab.ch](mailto:info@indulab.ch)

Stand April 2026 // Ihr indulab Team.

[www.indulab.ch](http://www.indulab.ch)