

Bandage mit einfacher Dehnungskontrolle **Jedes Mal!**

Hochwertige kohäsive Flex-Bandage mit optischer Sicherheit

Es ist schwierig einzuschätzen, wie fest eine Bandage angelegt ist, insbesondere wenn man darin nicht geschult ist. Das Hauptproblem besteht jedoch darin, dass unsere Haustiere nicht sprechen können und daher nicht das notwendige Feedback geben können.

Der KRUUSE SafeVet®-Bandage verfügt über ein unverwechselbares, geschütztes Designmuster, das den tatsächlichen Dehnungsgrad visualisiert. Der visuelle Hinweis dient als Frühwarnhinweis, um das Risiko einer zu engen Bandage zu verringern.

Spannungen, die Sie nicht sehen können – Komplikationen, die Sie nicht wollen

Zu enge Bandagen können die Durchblutung einschränken und zu schweren Komplikationen führen. Zu den bewährten Verfahren gehören eine gleichmäßige, kontrollierte Spannung und regelmäßige Überwachung, um ein sicheres und wirksames Verbinden zu gewährleisten.



Source: MSD Veterinary Manual, "Wound Bandages and Dressings for Small Animals" (2023) und KSVDL Diagnostic Insights, "Five Bandaging Complications You Should Know About" (2020)



Behutsame Behandlung

So legen Sie die Bandage an – Schritt für Schritt

Befolgen Sie immer die Anweisungen Ihres Tierarztes.

Diese Anleitung hilft Ihnen, die Bandage sicher und bequem anzulegen.

1 Beginnen Sie unterhalb des Bereichs

Beginnen Sie mit dem Wickeln direkt unterhalb der betroffenen Stelle und arbeiten Sie sich nach oben vor.

2 Überlappen Sie jede Schicht

Wickeln Sie die Bandage so, dass jede neue Schicht etwa die Hälfte der Breite der vorherigen bedeckt.

3 Sanft dehnen

Nicht zu fest ziehen. Üben Sie durch sanftes Dehnen einen leichten, gleichmäßigen Druck aus.

Tipp: Achten Sie auf das quadratische Muster – wenn alle Seiten gleichmäßig aussehen, ist die Dehnung genau richtig!

4 Sichern Sie die Bandage

Drücken Sie leicht entlang der gewickelten Bandage, damit dieser an sich selbst haftet und an Ort und Stelle bleibt.

5 Auf Probleme prüfen

Untersuchen Sie den Bereich regelmäßig auf Anzeichen von Schwellungen, Kälte oder Farbveränderungen. Wenn Ihnen etwas Ungewöhnliches auffällt, wenden Sie sich an Ihren Tierarzt.

6 Vorsichtig entfernen

Rollen Sie die Bandage langsam ab oder schneiden Sie ihn mit einer Schere durch. Achten Sie darauf, das Fell oder die Haut Ihres Haustiers nicht zu verletzen.

7 Nur einmal verwenden

Die Bandage nicht wiederverwenden. Aus hygienischen und Sicherheitsgründen immer ein frisches Produkt anlegen.

8 Richtig lagern

Bewahren Sie nicht verwendete Bandagen an einem kühlen, trockenen Ort auf – fern von Sonnenlicht und Feuchtigkeit.



**Bis zu 50 %
Dehnung**



Staserisiko

Das Quadrat lügt nicht

Das Designmuster gibt an, wann mit dem Festziehen der Bandage aufgehört werden darf. Wenn das Quadrat auf allen Seiten gleichmäßig ist, ist alles in Ordnung. Wenn das Quadrat jedoch auf den oberen und unteren Seiten länger wird, ist es dem Patienten zu eng.



Weitere
Informationen
finden Sie im Video

