

Merkblatt zum Umgang und Auffrischen von Tischplatten

Polyesterplatten

- Um die Vorteile der Polyesterplatten zu unterstreichen empfehlen wir im OP ohne Auflagematte zu arbeiten, denn
 - die Platte ist einfacher zu reinigen und zu desinfizieren
 - die Tischplatten sind wärmenneutral
- Wenn Auflagematten verwendet werden ist darauf zu achten, dass ausschließlich Auflagematten verwendet werden die Farbecht sind und keine Farbe abgeben, da es sonst zu Verfärbungen der Tischplatte kommen kann !
- Wenn der Tisch nicht verwendet wird , sollte die Auflagematte quer zur Längsrichtung gelegt werden damit sich kein Feuchtigkeitsstau bildet
- Bei der Verwendung von braunolhaltigen Desinfektionsmitteln ist darauf zu achten, dass die stark färbende Wirkung von Braunol nicht die Oberfläche angreift.
- Die Oberfläche der weißen Polyesterplatte ist kratzbeständig gegenüber dem Horn von der Krallen
- Metallische Gegenständen können zu Kratzern an der Oberfläche führen
- Zur Reinigung der Polyester-Tischplatte empfehlen wir im Haushalt verwendete, jedoch nicht scheuernde Reinigungsmittel

Datum , Kenntnis genommen , Unterschrift

Edelstahlplatten

- Tischplatte mit handelsüblichen Chromstahlreinigungs- und Desinfektionsmittel reinigen.
- Nach unseren Erfahrungen sollten keine chlorhaltigen Reiniger, Bleichmittel, oder starke Säuren verwendet werden
- bitte verwenden Sie keine Scheuerschwämme oder harten Gegenstände
- immer in Schliffrichtung (lange Seite der Tischplatte) wischen

Auflagematten

- Auflagematte täglich reinigen
- zum Trocknen quer zur Tischplatte legen, damit die Auflagematte und die Tischplatte auslüften kann
- Auflagematte nur trocken und auf trockenen Tischplatten verwenden

Nassschleifen, Polieren von Polyesterplatten

- Reparaturstellen nass anschleifen, (Wasser mit wenig Spülmittel)
- Zuerst mit Schleifpapier 400 für gröbere Kratzer
- Dann mit Schleifpapier 600 für weniger tiefe Kratzer
- Vor dem Polieren mit Schleifpapier 1200
- Trocken abwischen
- Mit weichem Baumwolltuch und Polierpaste polieren

Wir wünschen gutes Gelingen!

Bitte rufen Sie uns an wenn Sie Fragen haben!