

# Anwendung, Reinigung und Pflege

DER SCHERKÖPFE FÜR ISIS, VEGA, EXACTA, AKKURATA UND BASECUT

Die richtige Anwendung, Reinigung und Pflege ist bei den Scherköpfen für die Trimmer besonders wichtig, um die Maschinen lange betriebsbereit zu erhalten.

## Isis und Exacta

Anwendungsgebiete der Exacta und Isis sind spezielle Partien wie Pfoten und Gesicht; die Isis wird auch bei der Vorbereitung der Biopsie verwendet. Die Maschine ist nicht dazu geeignet, einen Hund komplett zu scheren. Dafür ist weder der Scherkopf noch der Motor ausgelegt.

Die häufigste Anfrage in unserem Hause ist:

**Die Maschine ist noch nicht lange im Einsatz und funktioniert nicht mehr!**

Danach wird die Maschine ohne Scherkopf eingeschaltet. Läuft diese normal, ist der Scherkopf Ursache des Problems. Die Maschine hat einen Schutzmechanismus und schaltet sich nicht ein, wenn die Scherblätter des Kopfes verklebt sind und sich nicht mehr bewegen lassen. Somit wird verhindert, dass die Maschine „durchbrennt“.

**In 90 % der Fälle liegt das Problem nicht bei der Maschine, sondern beim Scherkopf.**

Um dies zu testen, wird der Scherkopf abgeschraubt. Das erfolgt mit dem unter der Ladeschale befindlichen Inbusschlüssel.



Deshalb ist die richtige Pflege des Scherkopfes äußerst wichtig.



### ÖLEN VOR DER ARBEIT

Vor jeder Benutzung ist der Scherkopf einzuölen. Dazu verwendet man das mitgelieferte Schermaschinenöl. Einige Tropfen Öl werden direkt auf die Schermesser gegeben. Danach lässt man die Maschine einige Sekunden im Leerlauf laufen, damit sich das Öl gut verteilen kann und nicht auf das Haar des Tieres übertragen wird.


Bei Verwendung von Desinfektionsmitteln sind die Scherköpfe gründlich zu trocknen, um Korrosion zu verhindern. Nach dem Trocknen ist der Scherkopf gründlich einzuölen.

### ÖLEN WÄHREND DER ARBEIT



**Das Ölen ist alle 5-10 Minuten während der Arbeit zu wiederholen.** Das verhindert, dass der Scherkopf heiß und zu sehr beansprucht wird. Er wird sonst schneller stumpf und muss früher ausgewechselt werden.

### REINIGUNG UND PFLEGE NACH DER ARBEIT

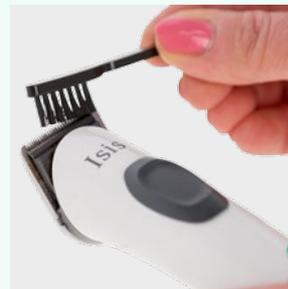

Nach der Arbeit, wenn die Maschine bis zum nächsten Einsatz nicht mehr benötigt wird, ist der Scherkopf gründlich zu reinigen. Mit einem weichen Pinsel oder einer weichen Zahnbürste werden die Haare und der Schmutz entfernt.




Für das Reinigen und Ölen zwischen den Schermessern eignet sich auch sehr gut ein Ölspray mit einem Röhrchen als Aufsatz. Damit wird noch mehr Druck erzeugt und der Schmutz herausgesprüht und das Öl besser zwischen den Schermessern verteilt.

## Bitte bauen Sie niemals den Scherkopf auseinander - er ist dann nicht mehr brauchbar!

Die Scherköpfe der Trimmer Isis/ Exacta, Vega/ Akkurata sowie der BaseCut können nicht nachgeschliffen werden. Ist der Scherkopf stumpf oder defekt muss er gegen einen neuen ausgetauscht werden.

Werden diese Pflegehinweise nicht beachtet, wird der Scherkopf recht schnell unbrauchbar und sieht auseinander gebaut unter Umständen so aus:

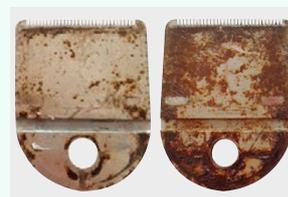

Ein Gebrauch ist so nicht mehr möglich und ein neuer Scherkopf muss angeschafft werden.

## Bei weiteren Problemen mit der Maschine ist zunächst Folgendes zu prüfen:

### DER AKKU LÄDT NICHT MEHR AUF:

Bitte prüfen, ob die Kontakte in der Ladestation und an der Maschine trocken und sauber sind. Die Reinigung der Kontakte kann mit einem in Alkohol oder Spiritus getauchten Wattebausch erfolgen.

Die Maschine darf erst in die Ladestation gestellt werden, wenn die Kontakte absolut trocken sind, da die Gefahr besteht, dass Kriechströme entstehen und das Gehäuse heiß wird.

Die Maschine sollte beim ersten Mal bis zum Stillstand des Motors entladen werden; dies sollte gelegentlich wiederholt werden.

Die rote Landeanzeige leuchtet immer, wenn Ladestrom fließt.

## Die Vega und Akkurata

Anwendungsgebiete der Vega und Akkurata sind kleinflächige Partien in der Hundeschur, wie Hals, Bauch, Kopf und Gesicht; die Vega wird in der Veterinärschur verwendet.

Die Maschine ist nicht dazu geeignet, einen großen Hund komplett zu scheren, oder Hunde zu scheren, deren Fell stark verunreinigt ist. Dafür ist weder der Scherkopf noch der Motor ausgelegt.

Das Pflegen und Ölen der Scherköpfe ist besonders wichtig, um diese lange betriebsbereit zu erhalten. Auch hier sollte, wenn die Maschine nicht mehr läuft, getestet werden, ob dies ohne Scherkopf der Fall ist. Dazu wird der Scherkopf von der Maschine entfernt, indem dieser nach hinten geklappt wird.

Die weiteren Punkte, wie Ölen vor und während der Arbeit, sowie Reinigung und Pflege nach der Arbeit sind analog der Ausführungen für die Isis und Exacta.

Die Vega und Akkurata haben eine Ladeanzeige. Die Anzahl der leuchtenden Segmente gibt den Hinweis, wie voll der Akku noch ist, bzw. wann die Maschine aufgeladen werden muss.

### BESONDERHEITEN:

Die Schnitthöhe 0,5 mm, 1,5 mm und 2,5 mm kann direkt am Scherkopf eingestellt werden.

Es besteht die Möglichkeit des Kabelbetriebes, denn der Stecker für die Ladestation passt auch in die Maschine. Die Akkurata hat eine Funktionssperre für den Transport. Diese wird aufgehoben, indem das Gerät in die angeschlossene Ladestation gestellt wird. Nach ca. 5 Sekunden ist die Maschine betriebsbereit.

Maschinen mit einer roten Ladeanzeige sind mit Lithium-Ionen Akkus ausgestattet.

Maschinen mit der blauen Anzeige sind ältere Versionen und mit Nickel-Metallhydrid Akkus ausgestattet.



## BaseCut

Anwendungsgebiete der BaseCut sind analog der Isis/Exacta und Vega/Akkurata.

Die Pflegeanleitung für die BaseCut ist analog der Vega/Akkurata.



AESCULAP® – a B. Braun brand

Albert Kerbl GmbH | Felizenzell 9 | 84428 Buchbach | Deutschland | schermaschinen@kerbl.de | www.kerbl.de